


Plaquettes

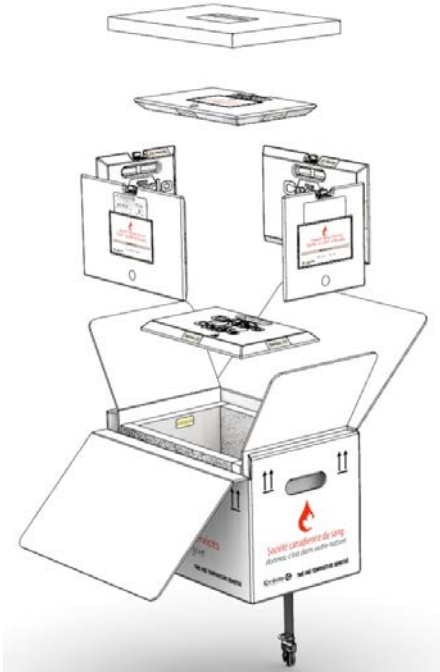

Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur de 8 litres à isolation sous vide, avec panneaux isolants intacts (voir exemples ci-dessous)
- 6 plaques eutectiques de type 22 disposées en cube
- Plaquettes installées à l'intérieur du cube
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de livraison) \leq 24 heures

Installation conforme



- Les panneaux d'isolation sont rigides et leur enveloppe est bien étirée.

Installation non conforme




- Le panneau arrière manque de rigidité et son enveloppe est gondolée, ce qui signifie qu'il n'est plus sous vide.



Canadian Blood Services
Société canadienne du sang

Head Office / Siège social
1800 Alta Vista
Ottawa, ON K1G 4J5
T 613.739.2300 F 613.731.1411
www.blood.ca www.sang.ca

Produits congelés

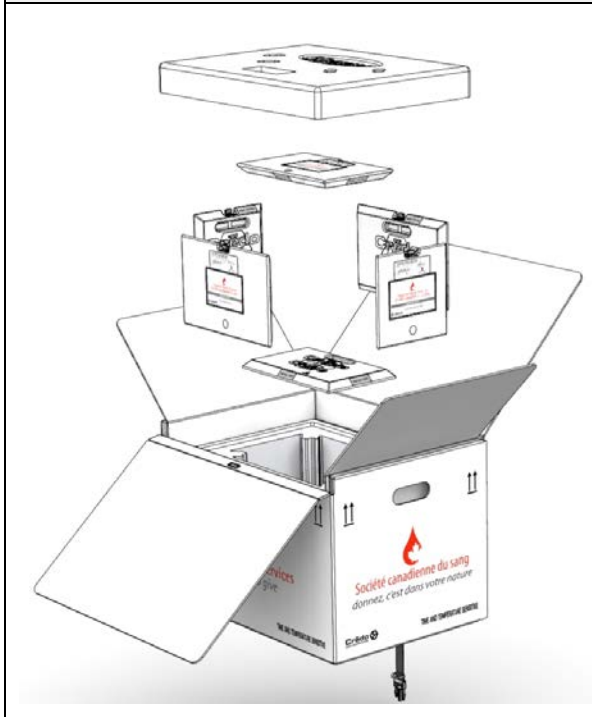

Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur de 8 litres à isolation en polystyrène expansé
- 6 plaques eutectiques de type 20M disposées en cube. La plaque du dessus doit être posée directement sur les produits et, si nécessaire, du matériel d'emballage est placé au-dessus de la plaque.
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de livraison) \leq 24 heures


Remarque : À la réception, la température des plaques est égale à -20°C ou moins. Le port de gants est donc conseillé pour les manipuler.

Share your vitality

Partagez votre vitalité



Protéines plasmatiques à température ambiante

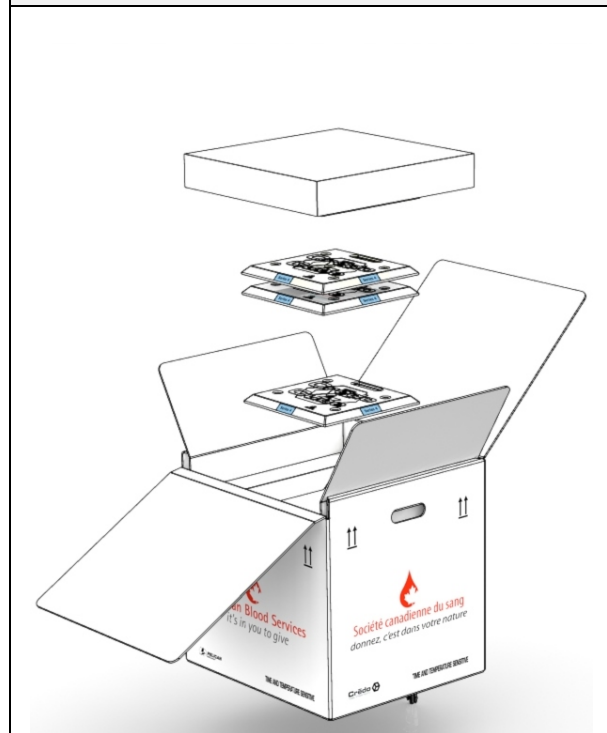


Éléments à confirmer à la réception :

- Conteneur de 16 L à isolation polyuréthane fermé hermétiquement
- 3 plaques eutectiques carrées de type 4 : 2 plaques au-dessus des produits et 1 plaque en dessous
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de livraison) \leq 24 heures

Remarque : Les protéines plasmatiques conservées à température ambiante peuvent également être expédiées dans leurs boîtes d'origine si le transport se fait dans des conditions de température appropriées dans des véhicules de la Société canadienne du sang.

Protéines plasmatiques réfrigérées

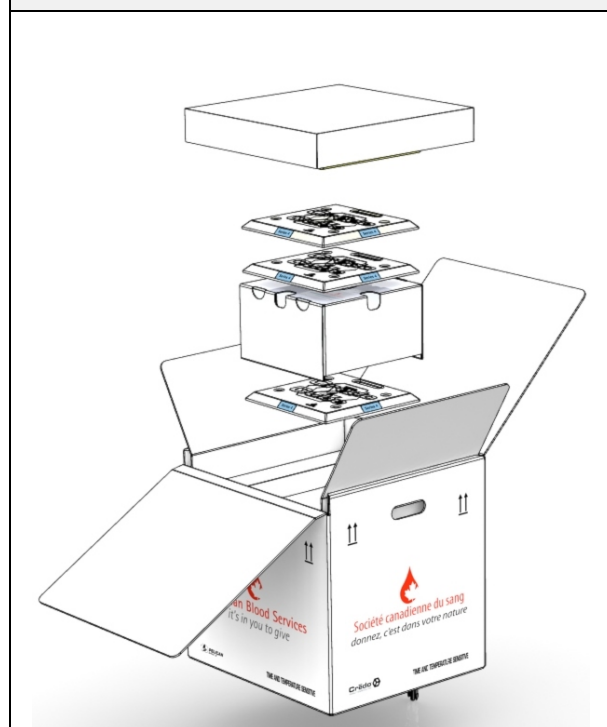

Éléments à confirmer à la réception :

- Conteneur de 16 L à isolation polyuréthane fermé hermétiquement
- 3 plaques eutectiques carrées de type 4 : 1 plaque dans le fond, 1 plaque au-dessus du contenant réfrigéré et 1 plaque en haut.

Remarque : Les produits peuvent être placés dans le contenant réfrigéré, entre la plaque du fond et la plaque du milieu, ou entre la plaque du milieu et la plaque du dessus. Lorsqu'ils sont placés dans le contenant réfrigéré, la plaque du milieu et la plaque du dessus se retrouvent l'une sur l'autre, au-dessus du contenant réfrigéré.

- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de livraison) \leq 24 heures.
- Des CGR peuvent également être livrés selon cette configuration avec des protéines plasmatiques.